

ALGINoplast®

Návod k použití 

regular set/fast set

Oblast použití: ALGINoplast® je vhodný pro všechny otisky, u kterých lze používat algináty.

Popis: *regular set:* bezprašný prášek žluté barvy na alginátové bázi
fast set: bezprašný prášek lososové barvy na alginátové bázi

Příprava: pomocí odměrové lžice na prášek a nádoby na vodu

Zpracování: obsah balení přesypat po otevření do vzduchotěsné uzavíratelné nádoby. Vždy otevřít a přesypat pouze jednu náplň. Před použitím nádobu 2–3krát otočit, aby došlo k načechrání prášku.

Poměr míšení: 23 g prášku : 50 ml H₂O

Dávkování: 1 (2) (3) (4) Lžice $\hat{=}$ 7,0 g (14,1 g) (21,2 g) (28,2 g) prášku : 15,3 ml (30,6 ml) (46,0 ml) (61,2 ml) vody

ALGINoplast® odebrat odměrovou lžicí z nádoby a popř. odstranit nadměrné množství prášku ze lžice, dát do přípravné nádoby a přidat potřebné množství vody.

Pro otisk čelisti s plným počtem zubů jsou zapotřebí v průměru 3 odměrové lžice prášku ALGINoplast® a příslušné množství vody.

Pomocí stěrky smíchat prášek a vodu do homogenní konzistence. Při použití automatických míchacích přístrojů dodržet pokyny výrobce přístroje.

	regular set	fast set
Doba míšení:	30 sekund	30 sekund
Doba zpracování:*)	90 sekund	60 sekund
Ponechání v ústech:	90 sekund	60 sekund
Celková doba tuhnutí: *)	180 sekund	120 sekund

Doba označená *) platí od počátku míšení a vztahuje se na teplotu prášku 23 °C/73 °F a tvrdost vody cca. 13 na stupnici tvrdosti vody. Vyšší teploty zkracují tuto dobu, nižší teploty ji prodlužují. Různá tvrdost používané vody může taktéž vést k odchylkám těchto časových údajů. Při použití destilované vody se doba zpracování a tuhnutí prodlouží o 30 sekund.

Odlití: nejvyšší přesnosti modelu se dosáhne, když se otisk po vyjmutí pečlivě omyje a ihned se odlije pomocí přípravku MOLDANO®, MOLDASTONE®, nebo MOLDASYNT®. Nelze-li zabránit delšímu uchování, otisk je nutno uchovávat ve vlhké atmosféře (v uzavřené nádobě).

Dezinfekce: otisky lze dezinfikovat běžnými dezinfekčními prostředky. Prosím dodržte přitom zpracovatelské předpisy příslušného výrobce.

Skladování: ALGINoplast® skladovat v uzavřené nádobě v suchu a chladu při maximální teplotě 25 °C/77 °F.

Doba trvanlivosti: viz údaje na balení

EN ISO 21563