

roeko

Gelatamp

Návod k použití

Pěnová hmota pro ošetření alveolu.

Složení:

Gram Gelatampu obsahuje 950 mg tvrzené želatiny (DAB 10) a 50mg koloidního stříbra (DAB6).

Použití:

Hemostáza a stabilizace po stomatologickém chirurgickém ošetření, prevence pooperační hemoragie.

Kontraindikace:

Infekční a hnisající rány.

Vedlejší účinky a interakce s ostatními přípravky:

Nejsou známy.

Dávkování:

Jeden kus želatinové pěny, upravené do potřebného tvaru, se vloží bez stlačování do čerstvě extrakční rány v alveolu. Mělo by být umožněno nasátí maximálního množství krve pod přímým pozorováním. Toto je konečné ošetření rány, která by neměla být dále vyplachována. V případě potřeby je možno k překrytí použít vatový váleček namočený ve vodě.

Vlastnosti a způsob účinku:

Lokální hemostatický efekt želatinové pěny je založen na schopnosti pěny pohltit velké množství krve a tak pomoci vytvořit fibrinovou zátku. Vzhledem k tomu, že želatina neprovokuje žádnou reakci tkání, může pěna zůstat v ráně a tak pomůže stabilizovat tkáňový defekt. Je zcela resorbovaná do čtyř až šesti týdnů.

Příměs koloidního stříbra, které působí oligodynamicky a je zcela netoxické, vykazuje antibakteriální účinky. Na rozdíl od jiných antibakteriálních přípravků nemůže být koloidní stříbro odplaveno a jeho nerozpustnost tak vytváří dlouhodobý efekt.

Poznámky:

Nádobka musí být okamžitě po použití uzavřena. Může být znovu sterilizována v horkovzdušném sterilizátoru při 150°C po 2 hodiny.

Farmaceutické přípravky musí být skladovány mimo dosah dětí a neměly by být požívány po datu expirace.

Uchovávejte v chladu a temnu.