

PARCAN

3% stabilizovaný roztok chlornanu sodného pro výplach kanálku

Složení:

3% chlornan sodný, chlorid sodný, uhličitan sodný, přísady 100 g

Indikace:

Výplach kanálku.

Vlastnosti:

Zásah do kořenového kanálku, případně procedura úspěšného utěsnění, vyžaduje výplachový roztok kombinovaný s chemo-mechanickým reamerem.

Parcan, 3% stabilizovaný roztok chlornanu sodného splňuje požadavky na efekt výplachového roztoku:

- chemický efekt rozpuštění organické matrice dentinu, umožňující snadnější vyčištění kanálku.
- baktericidální potence chlornanu sodného

Parcan jen stabilizovaný ústrojný roztok chlornanu sodného připraveného ihned k použití.

Návod k použití:

Do stříkačky Parcan Kit natáhněte 10 ml roztoku. Poté upravte speciálně dodávanou jehlu a vypláchněte kanálek.

Upozornění:

Abyste předešli riziku nanesení produktu za apex, je silně doporučováno:

- zkontrolovat apikální uzávěr (použití produktu pro nezralý zub či pro zub s kořenovou resorpcí je kontraindikací)
- zamezte použití produktu pod tlakem

Balení:

Výplachová lahvička 250 ml

Skladování:

Skladujte na tmavém místě v teplotě do 25°C. Nepoužívejte po vypršení expirace!

Farmako-terapeutické zařazení:

Dentální produkt pro profesionální použití

Výrobce:

Septodont, Francie