

ROOT CANAL SEALER

Pulpdent Root Canal Sealer se míchá do homogenní konzistence.

Tuhne pomalu, doba zpracovatelnosti je dostatečně dlouhá. Během tuhnutí expanduje, proto je vhodný pro dokonalé utěsnění kořenového kanálku. Uvnitř kanálku je nevysířebatelný, přebytečné přebytky jsou resorbovatelné.

Materiál se doporučuje aplikovat pomocí stříkačky Pulpdent Pressure Syringe, jeho jemná konzistence umožňuje průtok jehlou.

Jemnost částic Pulpdent Root Canal Sealera umožňuje dokonalější utěsnění akcesorních kanálků než jiné materiály.

Složení:

Tekutina: eugenol
kanadský balzám
Prášek: zinkoxid, kalciumfosfát, bariumsulfát, zinkstearát
Cement: ADA typ 3, 1.třída
Mísicí poměr: 1g prášku : 0,3 ml tekutiny nebo
3 odměrky prášku : 2 kapky tekutiny

Doba zpracovatelnosti: minimálně 30 sekund

Doba tuhnutí: minimálně 24 hodin

Skladujte při pokojové teplotě.

Nevystavujte přímému slunečnímu svítu.

Produkt je určen pro profesionální užívání zubními lékaři.

Návod k použití:

(Návod k použití stříkačky viz. Pulpdent Pressure Syringe)

1. Vyberte jehlu dlouhou tak, aby dosahovala hloubky 2-3 mm od apexu.
2. Smíchejte sealer do husté homogenní konzistence.
3. Napiňte stříkačku a nasadte jehlu.
4. Zasuňte píst a otáčejte jím, dokud se jehla nenaplní sealerem.
5. Zasuňte jehlu do rozšířeného kanálku. Otočením pístu o čtvrtotáčku vytlačíte přibližně 2-3 mm materiálu.
Umístění deposit sealeru může být zkontrolováno pomocí RTG.
6. Pokračujte v plnění kanálku za současného pomalého povysunutí jehly tak, aby se přerušil kontakt se stěnou kanálku. Zastavte jehlu v této pozici a otáčejte pístem dokud se v kavitě neobjeví přebytek materiálu. Potom pomalu vysouváte jehlu a otáčejte pístem, aby se zaplnil prostor po jehle.

Čištění stříkačky:

1. Odstraňte jehlu. Zašroubujte píst tak, aby vytlačil všechny materiál ze zásobníku. Pro dokonalé očištění použijte Pulpdent Wonder Orange. Vypláchněte, vytřete a vysušte. Pressure Syringe musí být vyčištěna do 15 min. po použití.
2. Jestliže sealer uvnitř stříkačky ztuhne, neodstraňujte ho silou. Nechte působit Pulpdent Wonder Orange přes noc a jemným tlakem odstraňte sealer. Můžete rovněž zásobník nahřát ve sterilizátoru nebo nad kahanem.