

NÁVOD NA PROVOZ
VYPLAVOVACÍHO PŘÍSTROJE VOSKU

W A P O - E X 8

Před uvedením do provozu si přečtěte návod

Přístroj smí být připojen pouze na síť s 220 V/50 Hz.

Postavení přístroje:

Přístroj musí stát ve vodorovné pozici. Spolu dodané výpustné hadice upevnit pevně prostřednictvím spony na přístroji.
Přístroj postavit vždy tak, aby byl dostatečný přístup k pracovní části a ovládacím prvkům.
Doporučujeme přístroj spojit pevně s odpadním systémem, jelikož přístroj je vybaven automatickým přepadovým systémem, t. zn., že i při uzavřeném výpustném kohoutu nadbytečná voda odteče. Mimo toho je usnadněno i celkové vyprázdnění (při čištění)

Uvedení do provozu:

Zástrčku zasunout do zásuvky
Filtreační podložku položit dolů s bílou stranou.
Přístroj naplnit vodou cca 20 litrů
Hlavní spínač zapnout (zelený spínač)
Přístroj okamžitě zahřívá vodu na základní teplotu (65 st.C), nebo na poslední uloženou vyplavovací teplotu
Je-li dosažena požadovaná teplota zhasne žlutá dioda a přístroj je připraven k provozu.

Při práci s Wapo – ex 8 by jste měli používat ochranné rukavice odolné vůči teplotě.

Wapo -Ex je vybaven suchou ochranou, aby se zabránilo přepálení ohřevu při nedostatku vody (oranžová dioda). Při průběhu programu se ozve i varovný signál.
Je třeba dbát toho, aby stav vody byl vždy nad bílým umělohmotným kruhem (viz na plášti), jinak se ohřev automaticky vypne.
Při déle trvající nečinnosti přístroje doporučujeme přístroj odpojit od elektřiny.

Ovládání:

Vyobrazení WAPO-EX 8

Vyplavování	1	Display	6	Ohřev	7
Čas	2	Změna hodnoty +	4	Start/ Stop	9
Teplota	3	Změna hodnoty -	5	Nedostatek vody	8

1. hlavní spínač zapnout svítí zelená
2. zkontrolovat stav vody – červená kontrolka nesmí svítit
3. volba programu: polymerace nebo vyplavování
4. připravené půlky kyvet vložit do přístroje
5. požadovanou dobu vyvařování nastavit (viz 6.2.)
6. nastavit požadovanou teplotu (viz 6.2.)
7. stlačením tlačítka start/stop se uvede do chodu program.
8. po dobu zahřívání svítí žlutá kontrolka (topení).
9. přístroj po ukončení nastaveného času sám vypne.

Každé stlačení tlačítka je signalizováno červeným svítícím bodem na tlačítku.

Nastavení času a teploty pro vyplavování

Nastavení času

1. stlačit tlačítko Zeit (čas)(č.2)
2. stlačit + (č.4)
3. tlačítko čas(2) nechat stlačenou a tl.+ nebo - nastavit požadovaný čas.

Nastavení teploty

- 1.tlačítko teplota č.3 stlačit
- 2.tlačítko + č.4 stlačit
- 3.tlačítko č.3 nechat stlačené a tl.+ nebo - nastavit požadovanou teplotu.

Ukládání do paměti

Individuálně vložené hodnoty je možné uložit a to tím, že se současně stlačí tlačítko vyplavování nebo polymerace a tlačítko +.Potvrzení tohoto kroku se objeví YES na ukazateli Led Novým úkonem se předešlý vymaže.Kombinací tlačítek polymerace a vyplavování se dostanete na základní hodnotu zadanou firmou Wassermann(15 min vyplavování a 65 st.C, nebo polymerace 8 hod. a 70 st.C).Tento krok bude potvrzen slůvkem YES.

Ruční provoz - vyplavování

U přístroje připravenému k provozu je kdykoliv možné přejít na ruční obsluhu,překlopením kulového kohoutu,tím se aktivuje sprcha.Po skončení činnosti je nutné kohout uvést vždy do základní polohy.

WAPO EX je připraven k provozu po dosažení teploty nad 60st.C,t.zn.,že činnost pumpy Je nastavena na tuto teplotu

POZOR NA NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ

- na sprchu a hadici nesahat
- trysku sprchy neobracet na živé bytosti
- voda vyvěrající ze sprchy může být horká až 95 st:C,proto s ní manipulujte pouze uvnitř přístroje
- po skončení práce vždy kohout uvést do základní polohy

Údržba

Čištění

Pro zajištění bezvadného chodu měl by se přístroj:

1x týdně

vyměnit vodu s přidáním wachs - ex
vyčistit bílé nivelisační značení

každé 2 týdny

vyměnit filtrační podložku

každé 4 týdny

vyčistit přístroj s kalk – ex

POZOR

Kalk – ex nechat působit maximálně 12 hod..Roztok vypustit a důkladně propláchnout

Pro čištění filtrační podložky a nivelizačního označení nejprve odstraňte košíky na květy,potom se může odejmout děrovaný plech,lehkým tahem nahoru.