

# WIRODOUBLE

Agarová dublovací hmota

Návod na zpracování:

- 1) Dublovací hmotu WIRODOUBLE tavíme zahříváním až na teplotu 93°C.
- 2) Potom ji necháme zchladnout na teplotu 42°C.
- 3) Před dublováním ponoříme sádrový model na 5-10 min. do vody 38°C teplé.
- 4) Vyhřátý model osušíme papírovým kapesníkem, vložíme do dublovací květy KONBI obj.č. 52090 a přelijeme připravenou dublovací hmotou WIRODOUBLE.
- 5) Dublovací hmotu necháme chladnout 60-90 minut na proudícím vzduchu. Nikdy nechladíme dublovací hmotu ponořením do vody.
- 6) Po ztuhnutí vyjmeme sádrový model a zhotovíme dublovaný model ze zatmelovací hmoty WIROVEST.
- 7) Po ztuhnutí WIROVESTu a vyjmutí dublovaného modelu z dublovací hmoty opláchneme dublovací hmotu WIRODOUBLE pod tekoucí vodou. Odstraníme tak zbytky zatmelovací hmoty.